

Una parada cardiaca puede ocurrirle a cualquiera, normalmente de forma inesperada

LifePad® puede ayudar inmediatamente

Si no se actúa inmediatamente tras una parada cardiovascular, la probabilidad de supervivencia disminuye un 10 % por cada minuto que pasa – el cerebro humano sólo puede sobrevivir unos minutos sin oxígeno.

El oxígeno del cuerpo llega a los órganos vitales a través del masaje cardíaco.

Ventajas de LifePad®

Instrucciones paso a paso para la reanimación

Fácil de usar, no requiere conocimientos previos

Sistema de feedback visual y acústico

Para una profundidad y frecuencia de compresión óptimas

Tamaño compacto

Con 21 x 16 cm (formato DIN A5 aprox.), se guarda fácilmente en cualquier bolsillo

Material flexible

se adapta a la forma del cuerpo

Fácil colocación

instrucciones y señalizaciones directamente en la almohadilla

LifePad®

Primeros auxilios – seguro y rápido

LifePad®
Asistencia para la reanimación



LifePad® es un producto de Innotas AG y Beurer GmbH, en colaboración con la Fundación Björn Steiger.



IES MEDICAL

Innovation for better care

www.lifepad-rcp.com | www.iesmedical.es

☎ 944 008 848

✉ comercial@iesmedical.es

☎ Teléfono gratuito

900 535 295

¡Convértete en un ángel de la guarda!

LIFE
PAD

LifePad®

Su ayudante en caso de emergencia

LIFE
PAD



BE THE
HERO

¡Convértete en un ángel de la guarda!

IES MEDICAL
Innovation for better care

APLICACIÓN

Instrucciones paso a paso para la reanimación

1



Comprobar la consciencia y la respiración

2




Hacer una llamada de emergencia

3



Despejar la parte superior del cuerpo

4

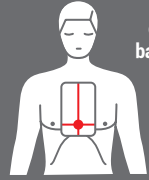

Tire de la cinta de la batería para encender

Colocar el LifePad®

5

Presione 5 - 6 cm



100 x/min

Realizar la compresión

6



Aliviar 5 - 6 cm

Aliviar la tensión en el pecho



Repita los pasos 5 y 6 al ritmo de la señal acústica (tono = pulsación) para garantizar una frecuencia de 100 compresiones por minuto.

El masaje cardíaco se lleva a cabo hasta que se vuelven a ver signos claros de vida o el médico de urgencias toma el relevo.

¿Sabía que las paradas cardíacas suelen producirse en casa o en el trabajo?




¿Qué hace especial a LifePad®?

En caso de emergencia, muchos de los reanimadores se ven agobiados al principio. El LifePad® le guía a través de la reanimación y le ayuda a llevar a cabo los pasos correctos de forma segura.

Sistema de retroalimentación visual y acústica

Las instrucciones de paso a paso le ayudan a mantener la compostura. Los LED de colores te informan visualmente sobre la presión de compresión óptima.

Una señal acústica indica la frecuencia de compresión óptima de 100 pulsaciones por minuto.

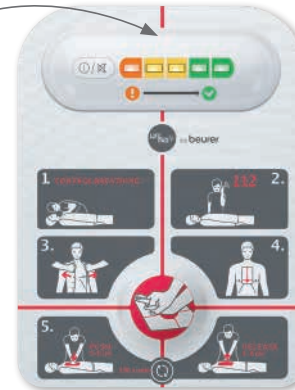

¡No dude en actuar de inmediato!



LAS APLICACIONES MÁS COMUNES

Fácil de usar y siempre contigo

En el tráfico por carretera



LIFE PAD

En su tiempo libre



Gracias a su material flexible, LifePad® se adapta a cualquier forma corporal y puede utilizarse en personas a partir de 12 años. La superficie de apoyo muestra la posición exacta de las manos para la reanimación. El dispositivo también puede utilizarse en combinación con un desfibrilador (la señal acústica puede desconectarse).

En el trabajo

